

Manutenzione delle lenti a contatto di set

RGP

1. Mettere le LAC in un contenitore con perossido di idrogeno, senza sistema neutralizzante
2. Lasciare in immersione 3 ore
3. Risciacquare con soluzione salina, asciugare e conservare asciutte
4. Pulire e risciacquare le LAC prima dell'utilizzo

- Tutte le LAC devono essere pulite e risciacquate prima della disinfezione
- Queste procedure prevedono un utilizzo off-label dei sistemi disinfettanti al perossido, che non può essere esteso ai portatori di LAC

Morbide e ibride

1. Mettere le LAC in un contenitore con perossido di idrogeno, senza sistema neutralizzante per 3 ore
2. Spostare le LAC in un contenitore con perossido fresco e sistema neutralizzante
3. Procedere alla disinfezione e neutralizzazione come raccomandato dal produttore
4. Risciacquare e conservare con soluzione unica
5. Ripetere ogni 28 giorni se le LAC non vengono riutilizzate nel frattempo

- Queste linee guida sono state sviluppate in collaborazione con l'American Optometric Association Contact Lens and Cornea Section e l'American Academy of Optometry Section on Cornea, Contact Lenses and Refractive Technologies sulla base delle raccomandazioni all'interno dello standard dell'International Organization for Standardization (ISO) 19979: 2018.
- Sindt C, Bennett E, Szczotka-Flynn L, Sclafani L, Barnett M; American Academy of Optometry (AAO) Section on Cornea, Contact Lenses & Refractive Technologies, and The American Optometric Association (AOA) Contact Lens and Cornea Section. Technical Report: Guidelines for Handling of Multipatient Contact Lenses in the Clinical Setting. Optom Vis Sci. 2020;97(8): 544-548. doi:10.1097/OPX.0000000000001547